

Neu bei BELSANA

Ein Engel hilft beim Anziehen

Der Schlüssel zur Wirkung von medizinischen Kompressionsstrümpfen liegt im genau angepassten Druckverlauf. Daher wirken die Strümpfe im nicht angezogenen Zustand fest und eng. Besonders bei Bewegungseinschränkungen fällt daher vielen das Anziehen der Strümpfe schwer. Für Erleichterung sorgt seit April 2012 der BELSANA Engel, eine stabile, leicht zu reinigende Anziehhilfe, deren längere Griffe tiefes Bücken überflüssig machen. Angeboten wird das praktische Hilfsmittel für den täglichen Gebrauch zu Hause in einer stabilen Transportverpackung mit Tragegriff.

Medizinische Kompressionsstrümpfe sind eine wirksame Behandlung bei Venenleiden. Vorausgesetzt, sie werden regelmäßig getragen. Doch gerade dabei hapert es, wie Befragungen von Venenpatienten immer wieder zeigen. Ein Grund: Das Anziehen der Strümpfe fällt den Betroffenen schwer und kostet viel Zeit – vor allem wenn zum Venenleiden Erkrankungen hinzu kommen, die die Beweglichkeit einschränken und das Bücken erschweren. Für diese Patienten bietet BELSANA nun zusätzlich zur praktischen und beliebten blauen Anziehhilfe ein spezielles Anziehgestell – den BELSANA Engel - an. Sie kann für Strümpfe mit offener und geschlossener Spitze sowie Strumpfhosen genutzt werden.

Sicher in den Strumpf

Mit zur Seite geklappten „Flügeln“ steht der Engel fest auf dem Tisch oder dem Bett. Zum Anziehen wird der Kompressionsstrumpf mit der Ferse zur geschlossenen Seite der halbkreisförmigen Stange auf die Anziehhilfe geschoben. Um dabei das Gestrick bestmöglich zu schonen, empfiehlt sich das Tragen von BELSANA Spezial-Gummihandschuhen. Mit ihrem Profil an der Innenseite der Handfläche helfen sie, den Strumpf fest zu packen und gleichmäßig über die Anziehhilfe zu schieben, bis die Fußspitze fast oben ist. Nun die „Flügel“ des BELSANA Engels hochklappen und bequem in den Strumpf steigen. Dank der beweglichen, extra langen Griffe ist dies im Stehen und Sitzen möglich. Sobald die Fußspitze richtig über den Zehen sitzt, kann der Strumpf an den Griffen der Anziehhilfe langsam und gerade über das Bein gezogen werden. Bei Strumpfhosen das erste Bein nur bis zur Wade ziehen, dann das andere Bein anziehen. Zum Entfernen das Hilfsmittel einfach nach unten aus dem Strumpf schieben.

Für bestmöglichen Tragekomfort und eine optimale Wirkung ist ein guter Sitz der medizinischen Kompressionsstrümpfe wichtig. Daher den Strumpf immer gleichmäßig

am Bein anlegen und das Gestrick abschließend faltenfrei am Bein verteilen. Damit das Anlegen der Kompressionsstrümpfe mit der neuen, verschreibungsfähigen Hilfe oder bei Patienten, die erstmals einen Kompressionsstrumpf verschrieben bekommen haben, von Anfang an problemlos gelingt, findet sich auf der Verpackung der Anziehhilfe eine ausführliche Anleitung mit Farbbildern. Diese kann unter www.belsana.de auch im Internet heruntergeladen werden.